

RESPIRADORES DESCARTÁVEIS
MODELOS 4200, 4201,
4600 E 4601



More Air. More Wear™



MOLDEX®
Ideas that wear well.

RESPIRADORES DESCARTÁVEIS AIRWAVE

Respirar agora é uma brisa™

Mais ar. Maior uso.™

AirWave é a próxima onda em proteção respiratória, um passo revolucionário para o futuro dos respiradores descartáveis de hoje em dia. Sua tecnologia de onda com patente pendente permite uma respiração mais fácil para conforto fresco, fornecendo a proteção que você precisa durante todo o dia. Além disso, satisfaz o compromisso Moldex: respiradores confortáveis, duráveis, que aumentam a conformidade e reduzem os custos.

- Modelo ondulado exclusivo fácil de respirar
- Menor resistência, maior capacidade de respirar
- Respire como se tivesse uma válvula sem ter uma.
- Menor custo que outros respiradores com válvula.
- Maior tempo de uso e menos custo.



Respiradores com modelo mais fácil de respirar

AirWave – o respirador sem válvula que é mais fácil de respirar.

- Menos resistência do que outros respiradores descartáveis líderes do mercado*
- Resistência ao exalar muito menor que a dos principais respiradores valvulados*

Maior superfície, maior fluxo de ar

Airwave possui desempenho excelente por causa de sua tecnologia de design de onda de patente pendente. Ele permite maior fluxo de ar dentro e fora do respirador para conforto fresco e respiração mais fácil.

- Ondas exclusivas dobram a área de superfície do filtro do nosso respirador comparável
- Máscara Dura-Mesh® oferece proteção bidirecional contra sujeira do lado de fora e umidade no interior

Tamanho do Filtro

AirWave 4200

Model 2200

0 1X 2X



Conforto dentro e fora

Ao oferecer maior área de superfície, AirWave garante conforto fresco dentro do respirador, sem uma válvula. Além disso, nosso design exclusivo FlexFit® proporciona maior conforto e conformidade ao longo do tempo.

- Modelo FlexFit se expande e contrai na medida em que você se move e fala, para Maior conforto
- Arco nasal moldado livre de pressão, elimina reajuste e desconforto da banda nasal de metal

Menor Resistência.* Maior capacidade de respirar.

A principal medida da capacidade de respirar é a resistência. Para inalar e exalar, AirWave fornece menor resistência do que outros respiradores valvulados e sem válvula. Os benefícios da menor resistência incluem:

- Respiração mais fácil que torna possível usar por mais tempo
- Conforto ideal que minimiza o calor e acúmulo de umidade

Um preço que não vai deixar você sem fôlego

- Custa menos que um respirador valvulado
- Mais tempo de uso significa menor custo que outros respiradores sem válvula

Novo SmartStrap® exclusivo

Baseia-se na mais nova tecnologia de onda da série 4200 com a mais nova tecnologia para tiras.

- Tira de tecido macia ajustável, fresca e confortável.
- Pendurada no pescoço quando não está sendo utilizada.
- Sem metal.



Clássico com 2 tiras
4200 N95 Médio/Grande
4201 N95 Pequena
CA: 33.295

Ajustável



Pode ser pendurada




A malha externa Dura-Mesh® mantém o respirador limpo por mais tempo

A malha interior Dura-Mesh® evita a deformação do respirador devido ao calor e umidade

O filtro é protegido em ambas as partes pela Dura-Mesh®

O forro da Softspun® é confortável em contato com o rosto.

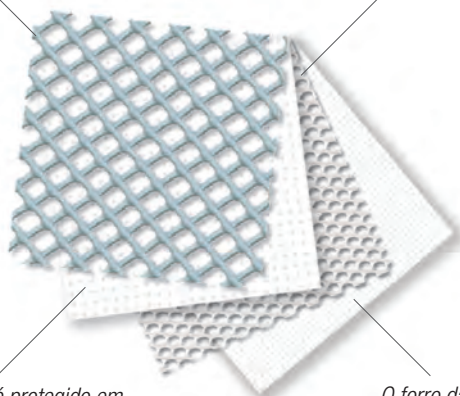

SmartStrap® Exclusivo
4600 N95 Médio/Grande
4601 N95 Pequeno
CA: 33.294

USO CONTRA

1. Aerossóis de partículas livres de óleo.

NÃO USE CONTRA

1. Concentrações de contaminantes que são desconhecidas, ou são imediatamente perigosas à vida ou à saúde.
2. Concentrações de partículas que excedem a concentração máxima ou 10 vezes o limite OSHA de exposição permitido, o que for menor.
3. Gases, vapores, amianto, tinta spray, jato de areia ou partículas de materiais que geram vapores nocivos.
4. Névoas à base de óleo.

RESTRIÇÕES

1. Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser utilizado em ambientes que contêm menos do 19,5% de oxigênio.
2. Não permaneça na área contaminada se houver problemas físicos como, por exemplo, dificuldade em respirar, tonturas ou náuseas.
3. Abandone a área contaminada e substitua o respirador se ele estiver danificado, distorcido, se não conseguir obter um bom ajuste ou se a respiração ficar difícil.
4. Antes de cada uso, verifique cuidadosamente todo o respirador, incluindo o meio de filtro e a área das tiras e a parte soldada para ver se há furos ou danos. As perfurações de encaixe/tira não afetam o rendimento do respirador.
5. Não altere, modifique ou abuse do respirador.
6. Armazenar os respiradores não utilizados em uma caixa / saco, em uma área não contaminada limpa e seca.
7. Descarte o respirador de acordo com a política do seu empregador e os regulamentos locais.
8. Descartar mais tardar 30 dias após a primeira utilização.
9. Use o respirador antes da data de validade impressa na caixa / saco plástico.
10. Se for usado para soldar, use óculos apropriados e proteção para o rosto.

AVISOS PARA O USUÁRIO

Para obter assistência técnica, ligue para o Departamento Moldex de Assistência Técnica em +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 ou +1 (800) 421-0668 ext. 512/550.

WARNINGS TO USER

1. Siga todas as instruções e advertências sobre o uso deste respirador e use-o durante todo o tempo de exposição. O não uso irá reduzir a eficácia do respirador, proteção do usuário, e pode resultar em doença ou morte.
2. Antes de usar, o usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso do respirador adequado, de acordo com as normas aplicáveis de segurança e saúde, para o nível de contaminação e exposição na área de trabalho onde está.
3. As partículas e outros contaminantes que podem ser perigosos para a sua saúde incluem aqueles que você não pode ver, sentir o sabor ou o cheiro.
4. Este produto não foi vendido com avisos ou instruções de uso para o pessoal envolvido na área da saúde ou situações relacionadas, onde pode haver a possibilidade de contato com as doenças ou riscos biológicos. Se você estiver considerando para este tipo de uso, primeiro ligue para o Serviço Técnico de Assistência Técnica Moldex, +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 ou +1 (800) 421-0668 ext. 512/550.

GARANTIA LIMITADA - AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Esta garantia limitada é feita no lugar das garantias de comercialização, adequação a propósitos particulares e todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Não existem outras garantias oferecidas além da descrição aqui indicada. Os padrões físicos e especificações da Moldex serão atendidas pelos produtos vendidos.

Reparações Exclusivas: danos de violação desta garantia limitada estão limitadas à substituição de tal quantidade de produtos Moldex e que seja provado que foram fabricados incorretamente. Salvo o disposto acima, a Moldex não será responsável por quaisquer perdas, danos, ou responsabilidade, diretos, indiretos, incidentais, especiais ou em consequência, decorrentes da venda, uso ou mau uso, ou a incapacidade de usar produtos pelo usuário.

DISTRIBUÍDO POR


MOLDEX-METRIC, INC.

10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com

BRASIL

Rua Tucuma 353 sobreloja Jardim Europa
Sao Paulo, SP 01455-010 Brasil
TEL/FAX: +55 (11) 2301-0652
E-mail: moldexbrazil@moldex.com

MOLDEX
Ideas that wear well.®

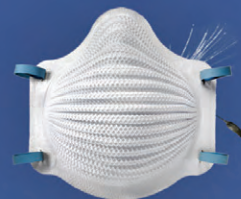

Feito nos
EUA



Printed on Recycled Paper

