

Instruções de Ajuste do Respirador Descartável

Moldex oferece até cinco tamanhos e cinco estilos para a força de trabalho diversificada de hoje em dia

MOLDEX
Ideas that wear well.

Com 2 Tiras



1. Segure o respirador com a mão colocando o contorno moldado do nariz (parte mais estreita) na ponta dos dedos, permitindo que as tiras da cabeça caiam para fora da mão.



2. Coloque o respirador sob o queixo, com o contorno do nariz (parte mais estreita) para cima. O encaixe do nariz não deve ficar dobrado dentro do respirador. Levante a tira de cima e coloque sobre a parte de trás da cabeça. Puxe a parte inferior e coloque sobre a cabeça, debaixo das orelhas, e ao redor do pescoço. Ao mudar qualquer modelo/tamanho, você deve fazer a prova de ajuste.



3. Ajuste o respirador para que fique confortável.



4. Cada vez que entrar em uma área contaminada, verifique a vedação da máscara. Cubra a frente do respirador colocando as duas mãos juntas sobre ela. **INALE PROFUNDAMENTE.** Você deverá sentir uma pressão negativa dentro do respirador. Se detectar algum vazamento nas laterais do respirador, ajuste as tiras puxando nas laterais e/ou reposicione o respirador. Repita até conseguir a vedação apropriada, se tiver problemas fale com seu supervisor. Entrar em uma área contaminada sem a vedação adequada pode causar doença ou morte.

HandyStrap®



1. Coloque a fivela atrás do pescoço com a máscara contra o peito.



2. a) Ajuste a máscara no rosto e puxe a parte de cima da tira na parte de cima de sua cabeça. A parte do nariz não deve ficar dobrada dentro do respirador.
b) Sempre utilize as tiras de cima e de baixo. Ajuste a tensão para que fique confortável. Ao mudar qualquer modelo/tamanho, você deve fazer a prova de ajuste.



3. Cada vez que entrar em uma área contaminada, verifique a vedação da máscara. Cubra a frente do respirador colocando as duas mãos juntas sobre ela. **INALE PROFUNDAMENTE.** Você deverá sentir uma pressão negativa dentro do respirador. Se detectar algum vazamento nas laterais do respirador, ajuste as tiras puxando nas laterais e/ou reposicione o respirador. Repita até conseguir a vedação apropriada, se tiver problemas fale com seu supervisor. Entrar em uma área contaminada sem a vedação adequada pode causar doença ou morte.



4. 3. Para pendurar no pescoço:
a) Solte a fivela.
b) Deixe a tira cair ao redor do pescoço.
c) Puxe a máscara para o peito
OU
a) Puxe a tira para a frente, afastando-a da cabeça.
b) Ajuste a tensão e deixe a máscara cair.

AirWave® SmartStrap®



1. Puxe o clipe de ajuste e prenda completamente na parte inferior da máscara.



2. Coloque a tira ao redor do pescoço para que a parte de fora da máscara fique contra o peito.



3. a) Ajuste a máscara no rosto e puxe a parte de cima da tira na parte de cima da cabeça. A parte do nariz não deve ficar dobrada dentro do respirador.
c) Sempre utilize as tiras de cima e de baixo.



4. Para apertar as tiras puxe as pontas de ambas as tiras. Para soltar, segure ambos os lados da tira do pescoço e puxe.



Printed on Recycled Paper

MOLDEX-METRIC, INC.
Moldex-Metric, Inc.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668
or +1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

BRASIL
Rua Tucuma 353 sobreloja Jardim Europa
Sao Paulo, SP 01455-010 Brasil
TEL/FAX: +55 (11) 2659 2108
E-mail: moldexbrazil@moldex.com

Departamento de Serviço Técnico Moldex
+1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500 ext. 512/550

Moldex, Ideias que caem bem, AirWave, HandyStrap, SmartStrap e o logo livre de PVC são marcas registradas. O desenho de malha e de ondas são marcas registradas da Moldex-Metric, Inc. Feito nos EUA.

9900B-037 REV A 8/13



5. Cada vez que entrar em uma área contaminada, verifique a vedação da máscara. Cubra a frente do respirador colocando as duas mãos juntas sobre ela. **INALE PROFUNDAMENTE.** Você deverá sentir uma pressão negativa dentro do respirador. Se detectar algum vazamento nas laterais do respirador, ajuste as tiras puxando nas laterais e/ou reposicione o respirador. Repita até conseguir a vedação apropriada, se tiver problemas fale com seu supervisor. Entrar em uma área contaminada sem a vedação adequada pode causar doença ou morte.

6. Para pendurar ao redor do pescoço, puxe a tira de cima afastando da cabeça e ponha a máscara para baixo.